


## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Перевірте термін придатності, діоптрійну силу та модель лінзи.
2. Уважно перевірте стерилізаційну упаковку. Не використовуйте інжектор або лінзу, якщо є підозри на порушення їхньої стерильності через пошкодження стерилізаційної упаковки тощо.
3. Відкрийте стерилізаційну упаковку та витягніть інжектор, тримаючи його за тримач. Відкривши упаковку, із пристроями необхідно працювати в асептичних умовах.
4. Переконайтесь у відсутності пошкоджень, видимих сторонніх предметів або пилу на поверхні інжектора чи лінзи, а також їх відповідності для імплантації.
5. Підготуйте інжектор до використання, виконавши кроки 1–5.

### **Крок 1.**


Введіть ОВМ в інжектор через інфузійний порт, скерувавши канюлю перпендикулярно до корпусу (Мал. 1). Заповніть ділянку, відзначену на Мал.1 пунктирними лініями, ОВМ і переконайтесь, що ОВМ повністю покриває оптику. Вводячи ОВМ, не допускайте контакту канюлі з лінзою.

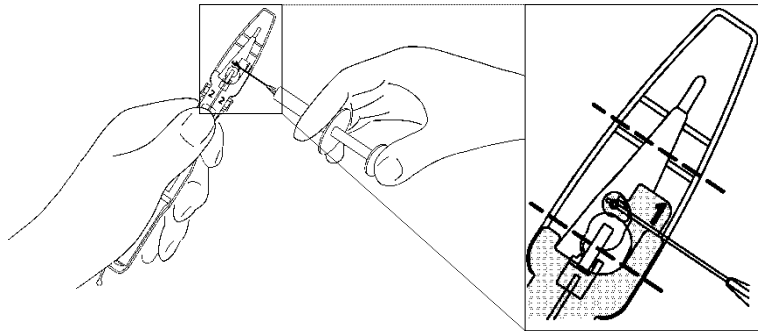


Мал. 1

### **Крок 2.**

Натисніть наконечники випуску, підніміть і зніміть кришку з контейнеру (Мал. 2).

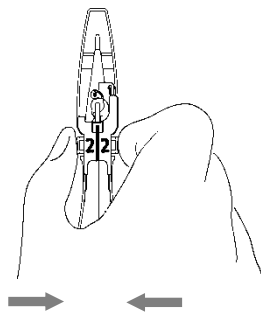

Мал. 2

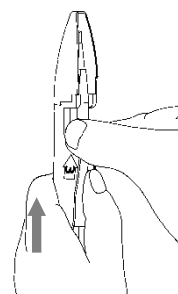


Мал. 3

### **Крок 3.**

Повільно натискайте на повзунк, доки він не зупиниться, підтримуючи контейнер великим пальцем руки (Мал. 3). Не відтягуйте повзунк назад, змістивши його. Виконайте імплантацію ІОЛ упродовж 3 хвилин після переміщення повзунка.

#### **Крок 4.**

Витягніть інжектор з контейнеру (Мал. 4). Після цього одразу перейдіть до Кроку 5.

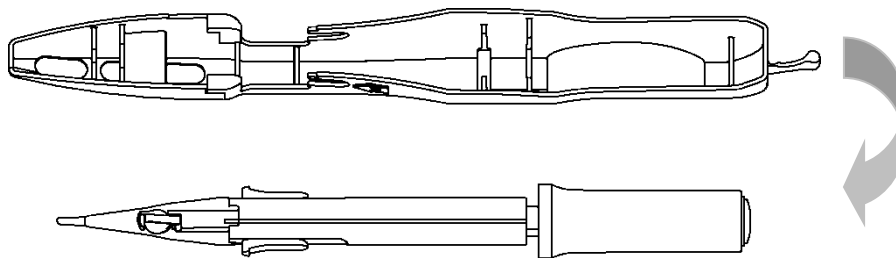


**Мал. 4**

#### **Крок 5.**

Натискайте на гвинт, доки він не торкнеться корпусу. Повільно поверніть гвинт за годинниковою стрілкою, уважно стежачи за тим, щоб задня гаптика була заправленою при просуванні стержня до заднього краю оптики, а також щоб направляюча гаптика була заправленою при подальшому просуванні лінзи (Мал. 5).

Не повертайте гвинт у зворотному напрямку під час просування.

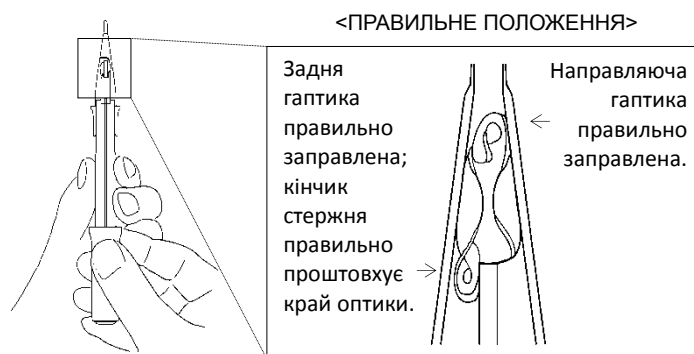

**Мал. 5**

Не продовжуйте, якщо направляюча та задня гаптика не знаходяться в правильному положенні, а також якщо кінчик стержня неправильно проштовхує край оптики (Мал. 6). Переконавшись в описаному вище, одразу перейдіть до наступного кроку.



**Мал. 6**

1. Обережно вставте наконечник в око через розріз зрізом донизу.
2. Повільно поверніть гвинт, щоб ввести лінзу до капсульного мішка. Інжектор не потрібно повертати.
3. Переконайтеся, що задня гаптика повністю вийшла з наконечнику, і витягніть інжектор із розрізу.
4. Відрегулюйте положення лінзи за допомогою гачка чи іншого інструмента.